

ARJO


ARJO

*Dextra*<sup>TM</sup>



*Gebruiksaanwijzing*



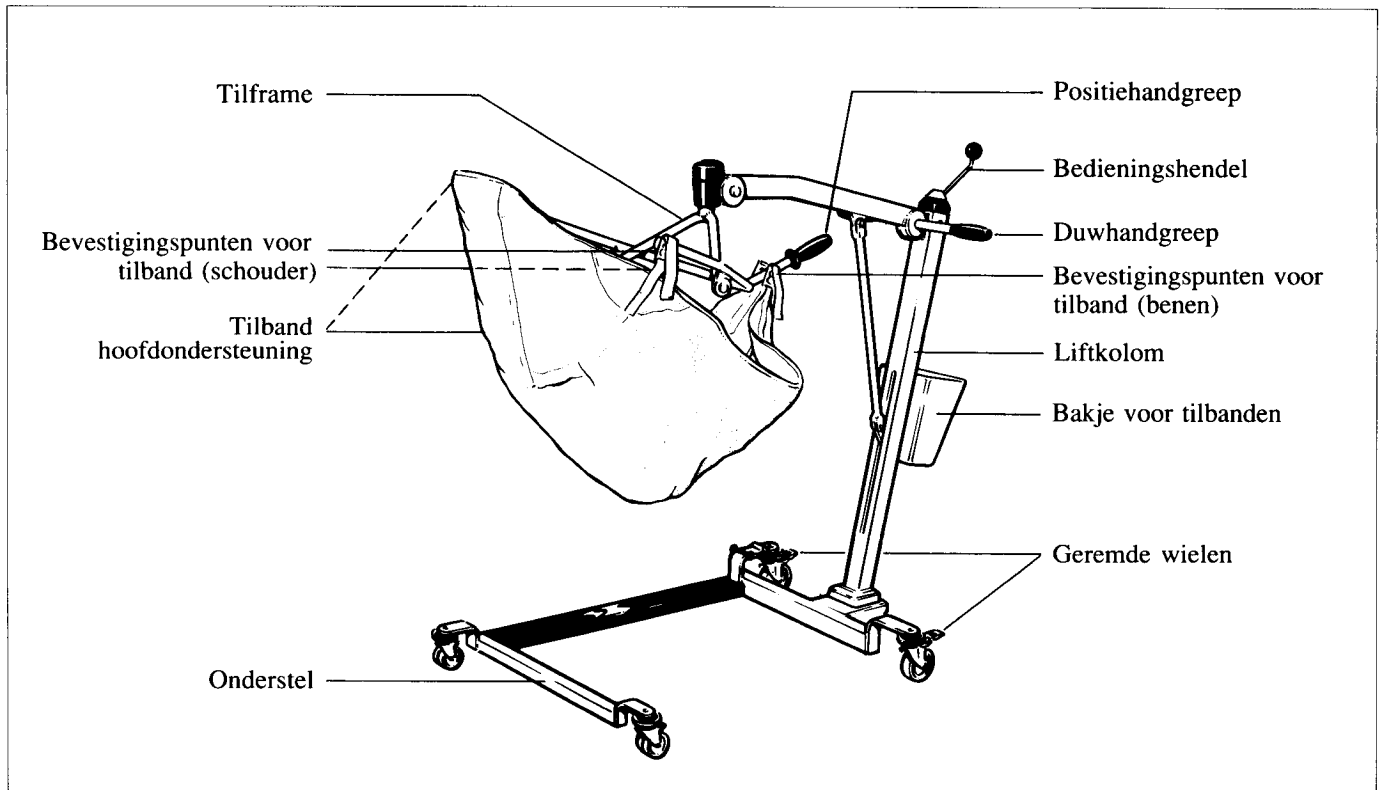


1. Maak Uzelf vertrouwd met de diverse onderdelen van de Dextra als op bovenstaande tekening.
2. Controleer bij ingebruikname van de Dextra of de liftkolom goed is bevestigd op het chassis.

De liftcapaciteit van de Dextra is 160 kg. Alle Dextra tilbanden zijn geschikt tot maximaal 160 kg. Een kleurcode geeft de maat aan. Rood - klein, geel - middel, groen - groot, blauw - extra groot. (zie sticker op hefarm).


## Tillen vanuit een stoel.

1. Breng de tilband aan achter de patiënt tot onderaan de rug. Zorg dat de hoofdondersteuning om het hoofd past. Breng de beengedeelten vanaf de buitenkant onder de bovenbenen aan.

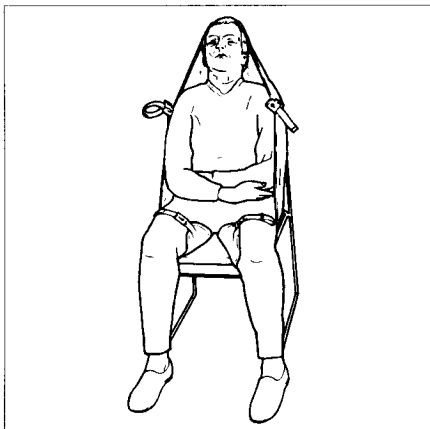


2. Voordat de patiënt met de Dextra getild gaat worden zorg dat:
  - a) De open zijde van het onderstel naar de patiënt wijst.
  - b) De positiehandgreep van het tilframe horizontaal staat en van de patiënt af gekeerd is.
  - c) Het brede gedeelte van het

- d) De Dextra voldoende dichtbij de patiënt is om de schouderclips van de tilband te bevestigen aan het tilframe. Wellicht moet U hiervoor de voeten van de patiënt op of over het onderstel plaatsen.
- e) De schouderclips worden aangehaakt.

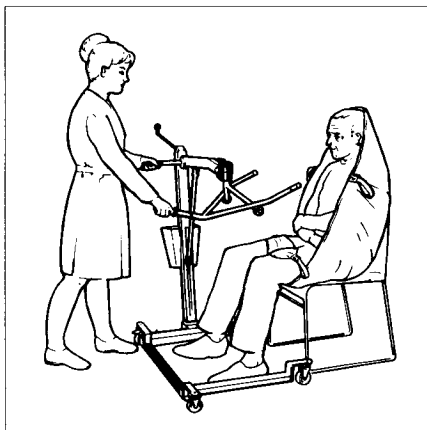


3. Duw de handgreep naar beneden en maak de beenclips vast. Indien noodzakelijk moet met de bedieningshendel het tilframe lager worden gedraaid. Let

er op dat het tilframe vrij van de patiënt blijft.

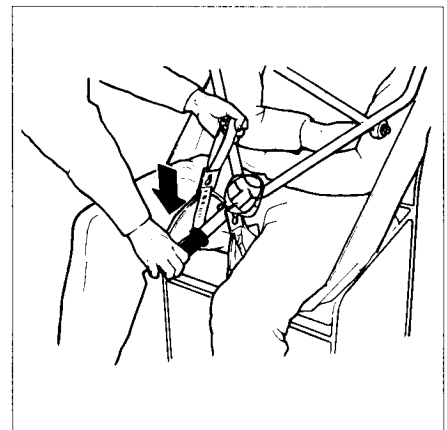


4. Overtuig U ervan dat alle vier de clips vastzitten en breng de patiënt omhoog door aan de bedieningshendel te draaien. Breng de positiehandgreep omhoog, zodat de patiënt iets achterover leunt. Zorg hierbij dat de patiënt voldoende vrij van de stoel is. De hoofdsteen ondersteunt nu het hoofd. Dit is de meest comfortabele positie voor tijdens het rijden, de druk op de benen is nu verminderd. De hoek kan

worden vergroot bij het verplaatsen van onrustige patiënten.

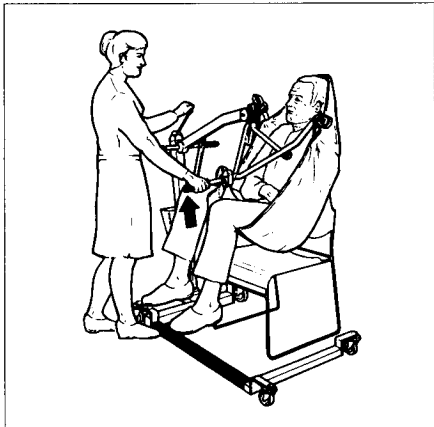

5. Wanneer we de patiënt weer in een stoel zetten - of bij de transfer van bed

naar stoel - druk de positiehendel naar beneden, zodat de patiënt in de juiste zithouding wordt gebracht. Dit voorkomt na-tillen.

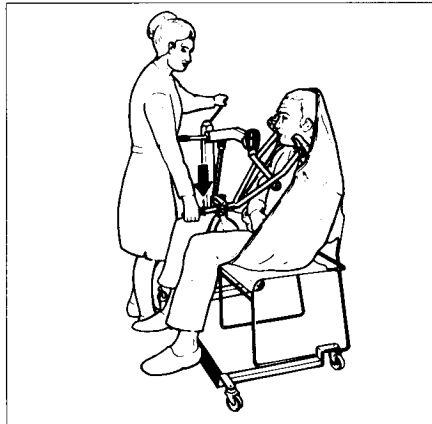


6. Draai de patiënt bij het transport met het gezicht naar de verzorger en breng de patiënt op normale stoelhoogte. Dit geeft de patiënt een prettig en veilig gevoel. Het rijden met de Dextra wordt er door verbeterd.




## Van bed tillen

1. Rol de patiënt op de tilband, zoals met een steeklaken, of breng de patiënt in zithouding om de band aan te brengen. (zie tillen vanuit een stoel).


2. Benader het bed met de open kant van het tilframe naar het hoofdeinde. Het verdient de voorkeur de open zijde van het onderstel naar het hoofdeinde van het bed te draaien.

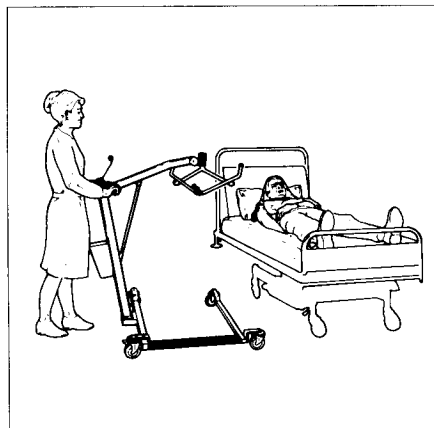

3. Druk met behulp van de positiehandgreep de schouderbevestigingspunten naar beneden en maak de schouderclips vast.

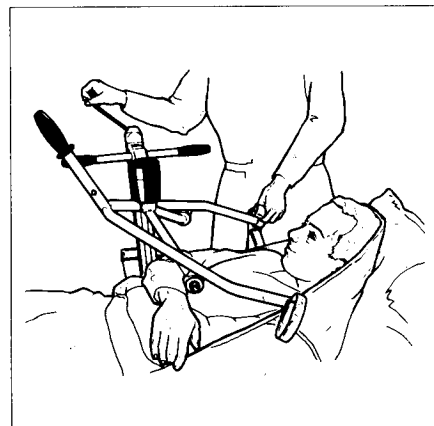


4. Druk nu de handgreep naar beneden tot de beenclips kunnen worden vastgehaakt. Eventueel moeten hierbij de benen worden opgetild of U moet het tilframe nog iets lager instellen.

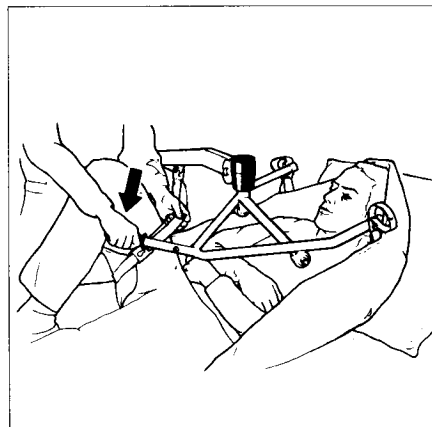

5. Bij tillen van bed of van de grond geven sommige gebruikers er de voorkeur aan om eerst de beenclips aan te brengen. In het bijzonder bij grote patiënten met dikke dijbenen. Til in dit geval het been zo ver mogelijk op en breng de beenclips aan. Daarna kantelt U het frame zover mogelijk naar de schouders om de bovenkant van de band vast te haken.


6. Draai de patiënt omhoog en breng hem in de meest prettige positie. Het speciale ontwerp van de Dextra tilband stelt één verzorger in staat de lift te bedienen zonder dat daarbij extra aandacht aan de positie van het hoofd besteed hoeft te worden.

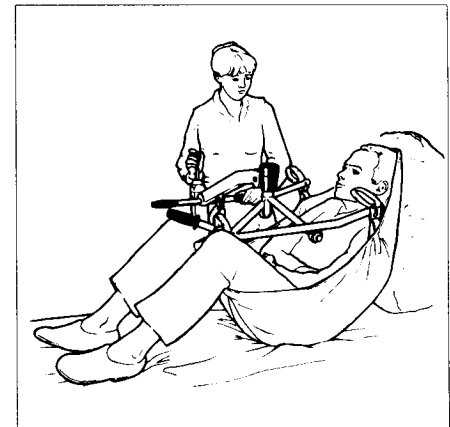

7. Breng met de lift de patiënt in de stoel (zie onder 5 "van lift in de stoel") of weer terug in bed. Laat de patiënt op het bed zakken en wanneer het lichaamsgewicht op het bed rust, verwijder dan de beenclips en daarna de schouderclips. Zet de Dextra weg voor U de band onder de patiënt wegneemt.


## Van de vloer tillen

1. Breng de band onder de patiënt door te rollen of de patiënt rechtop te zetten. U benadert de patiënt met de open kant van het Dextra chassis naar de patiënt toe. Het verdient de voorkeur om het hoofd en schouders van de patiënt door kussens of een tweede persoon zoveel mogelijk te ondersteunen.

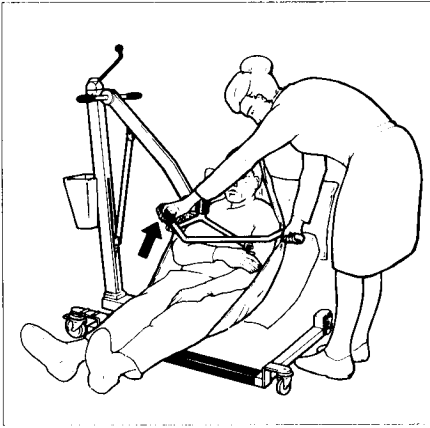


2. Haak de schouderclips het eerst vast door het open gedeelte van het tilframe naar de schouders te brengen. Wanneer deze vastzitten druk dan met de positiehendel het tilframe naar

beneden om de beenclips vast te haken. Hierdoor zullen hoofd en schouders van de patiënt enigszins opgetild worden.

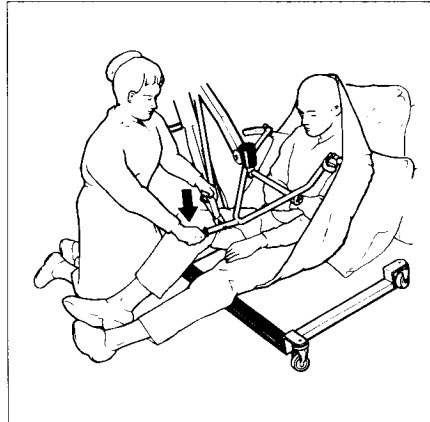

3. Bij het van het bed tillen en ook vanaf de vloer geven sommige gebruikers er de voorkeur aan eerst de beenclips vast te haken. Dit is het bijzonder bij grote patiënten met dikke bovenbenen. Til hierbij het been zoveel mogelijk op en breng de beenclips aan. Daarna kantelt U het tilframe om de schouderclips vast te haken.


4. Wanneer de beenclips zijn vastgehaakt, brengt U de patiënt omhoog in half liggende positie. De beenclips dienen zo aangebracht te zijn dat de patiënt er geen hinder van ondervindt. De patiënt kan nu in een stoel of op bed geplaatst worden.

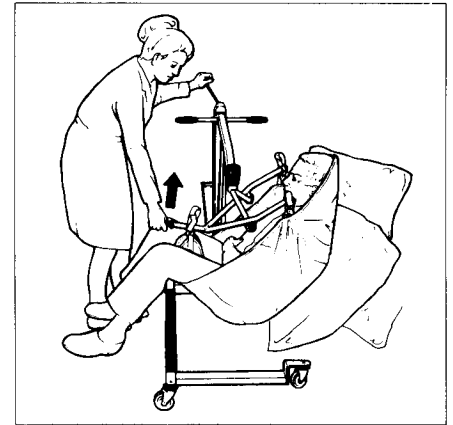


Patiënten met strekspasmen kunnen met de Dextra worden getild, maar speciale aandacht moet worden besteed aan het begeleiden van de benen bij het begin van het tillen.

## Verstelbaar onderstel.

Druk, indien de breedte van de stoel of rolstoel dit vereist, de poten van het onderstel naar buiten.

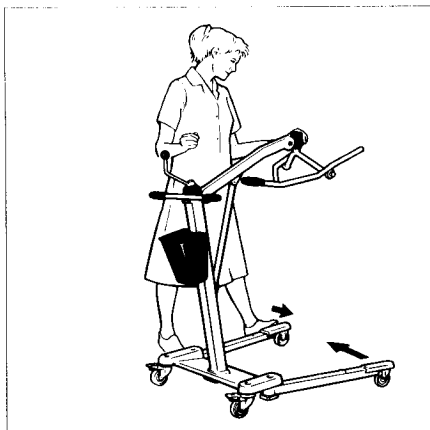

Duw de poten van het chassis weer terug voor gebruik in smalle ruimten, zoals in het toilet en om door smalle

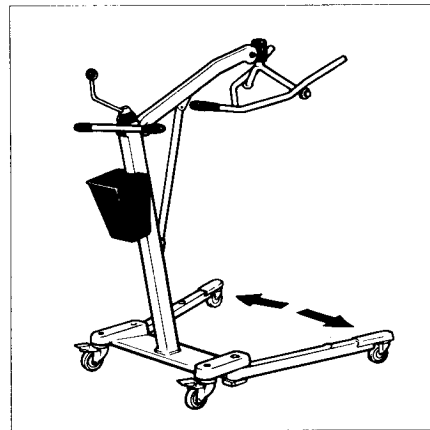

doorgangen te rijden. De patiënt kijkt hierbij in de richting van de verzorger.



GREAT BRITAIN  
Arjo Limited  
St Catherine Street  
GLOUCESTER GL1 2SL  
Tel. (0452) 500200  
Telefax (0452) 525207



FM 21964  
ISO 9001 · BS 5750 Part 1 · EN 29001

SWEDEN  
Arjo Hospital Equipment AB  
Box 61  
241 21 ESLÖV  
Tel. 0413-64500  
Telefax 0413-115 86

THE NETHERLANDS  
Arjo Mecanaid BV  
Laan van Westroyen 6  
Postbus 6116  
NL-4000 HC TIEL  
Tel. 03440-201 11  
Telefax 03440-16548

If your country is not to be found here, please contact your local distributor or Arjo Hospital Equipment in Sweden.

Subject to alterations - Rätt till ändringar förbehålles - Recht auf technische Änderungen vorbehalten - Sujet à modification